

# POLY STAINER



## barvící automat



- Barvící automat POLY STAINER nabízí pohodlí, spolehlivost a konzistenci nejen při barvení dle Grama, ale také pro barvení mykobakterií a celé řady dalších barvicích postupů.
- Automat vyniká jednoduchou obsluhou s možností programovat až 10 různých cyklů a snadnou údržbou.
- Do vyjímatelného košíku lze umístit až 20 sklíček současně.
- Součástí automatu je integrovaný kontejner na usušení obarvených sklíček.


### BARVÍCÍ POSTUP

1. Sklíčka určená k obarvení se ukládají do košíku, který je zavěšen na výtahovém raménku.
2. Pomocí displeje a měkkých tlačítek se navolí požadovaný program.
3. Košík projde automaticky všemi zvolenými pozicemi v nastavené časové délce s možností navolení opakovaného namáčení v jednotlivých kontejnerech.
4. Po ukončení programu se košík se sklíčky vrátí do výchozí pozice

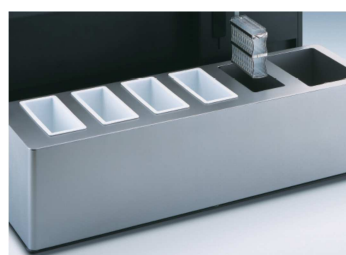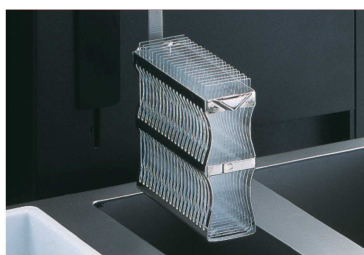

### Ochrana elektroniky

Všechny elektronické obvody a elektrické komponenty jsou zabudovány do vyvýšené horní části přístroje. Tím jsou chráněny před smočením tekutinou.

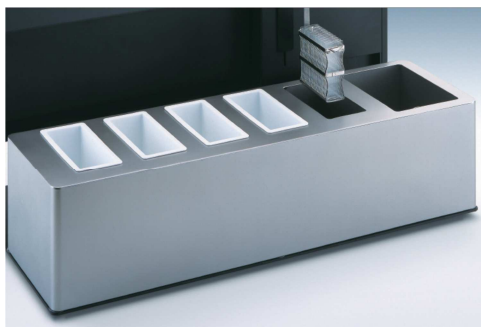

### Vyjímatelný nosič kontejnerů

Nerezová spodní část automatu, sloužící jako nosič kontejnerů s čidly, je snadno vyjímatelná, což usnadňuje údržbu přístroje.

### Rychlý odtokový systém

Systém je volitelným doplňkem přístroje a umožňuje vyprázdnit kontejner s vodou odtokem umístěným na dně. Klasická konfigurace, která je zahrnuta v ceně přístroje, využívá přepadu vody v kontejneru.



### TECHNICKÁ DATA

Počet sklíček v košíku:	až 20 ks
Kontejnery na čidla:	4 ks
Vana na oplach vodou:	1 ks s přepadem, volitelně lze zvolit odtok na dně vany
Kontejner na usušení:	o 12 ° C - 15 ° C vyšší než teplota v místnosti
Programování:	délka namočení košíku v jednotlivých kontejnerech s barvivou, nastavitelná délka přestávky a opakovaného namáčení, délka zadržení košíku nad kontejnerem po namočení
Počet programů:	možno uložit do paměti až 10 programů
Pozice v programech:	košík je nastavitelný do 10 různých pozic, v každé z nich je možno nastavit celkový čas namáčení, přerušení či opakování namáčení, případně odkapávání nad kontejnerem
Napájení:	100/240 V, 50/60 Hz, 250 W
Rozměry (D x Š x V):	700 x 440 x 400 mm
Hmotnost:	23 kg



#### BioVendor – Laboratorní medicína a.s.

Sídlo: Tůmova 2265/60, 616 00 Brno,  
provozovna: Karásek 1767/1, 621 00 Brno - Řečkovice  
Tel. +420 549 124 111, fax: +420 549 211 465,  
e-mail: info@biovendor.cz, www.biovendor.cz

