

WBC silné čisticí činidlo

► Informace o produktu ◄

Název produktu	Kat. č. produktu
Norma-iOptiClean	IC-81750

► Obsah produktu ◄

IC-81750	
iOptiClean	5x100 mL
Návod k použití	1 ks

► Zamýšlené použití a princip měření ◄

Detergent iOptiClean je vodný roztok pro čištění a dekontaminaci optického měřicího modulu poloautomatických hematologických analyzátorů Icon-5, Icon-5 OP a iVet-5 s funkcí čištění WBC Hard Clean.

Detergent je určen pro laboratorní profesionální použití jako diagnostický zdravotnický prostředek in vitro.

► Příprava detergentu ◄

Výrobek je připraven k přímému použití, dodržujte prosím instalační postupy uvedené v tomto návodu k použití.

► Složení produktu ◄

	iOptiClean
Detergenty	< 1.0 %
Hydroxid draselný	< 0.1 %
Povrchově aktivní látky	< 0.5 %
Stabilizátory	< 1.0 %
Deionizovaná voda	> 97.4 %



► Upozornění a bezpečnostní opatření ◄

- Před použitím si pozorně přečtěte návod k použití.
- Nepoužívejte výrobek po uplynutí doby použitelnosti.
- Výrobek nepoužívejte, pokud je poškozen primární obal nebo jsou na něm viditelné známky znehodnocení roztoku. V obou případech by měl být výrobek vyměněn.
- Vždy uchovávejte detergent v původní nádobě.
- Skladujte při doporučeném teplotním rozmezí.
- Výrobek nepoužívejte, pokud byl zmrzlý nebo uchováván při vyšší teplotě. Výrobek používejte při pokojové teplotě (18-30°C). Pokud byl skladován při teplotě nižší než 18°C nebo vyšší než 30°C, ponechtejte jej před použitím 3 hodiny při normální pokojové teplotě.
- Nemíchejte zbytky detergentu s jinými.
- NEUMISŤUJTE výrobek nad přístroj nebo na zem! Umístěte jej na stejnou úroveň jako analyzátor.
- Uživatelům se doporučuje, aby při manipulaci s chemickými produkty nosili schválený ochranný oděv: laboratorní plášť, rukavice a ochranu očí.
- Dodržujte standardní laboratorní opatření pro použití a dodržujte národní nebo místní zdravotní a bezpečnostní směrnice.
- Zabraňte kontaktu s očima, kůží a oděvem. V případě kontaktu s očima nebo pokožkou okamžitě opláchněte velkým množstvím vody.
- Přečtěte si prosím bezpečnostní list produktu.
- Každou vážnou událost týkající se produktu nahlase výrobcí a příslušnému místnímu úřadu.

► Skladování a expirace ◄

- Podmínky skladování: **2-35°C**.
- Expirace: **1 rok**.
- Stabilita otevřené lahvičky: **6 měsíců**.
- Datum expirace: **viz označení produktu**.

► Nakládání s odpady ◄

Odpadní produkt, nepoužitý produkt a kontaminovaný obal zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

► Jak používat: Icon-5, Icon-5 OP a iVet-5 ◀

Materiály, které jsou vyžadovány, ale nejsou součástí dodávky

- Norma hematologický analyzátor.
- Hadičky a uzávěry reagensů.

Bezpečnostní opatření při práci s detergentem

- Osoba, která pracuje s detergentem, musí být vyškoleným odborníkem v laboratoři.
- Použijte hadičky a uzávěry na reagensie dodané s přístrojem nebo je sejměte ze starého činidla.
- Vyčistěte hadičky otřením shora dolů pomocí hadříku nepouštějícího vlákna navlhčeného destilovanou vodou. Zabraňte jakémukoli prachu nebo mikrobiální kontaminaci hadiček a detergentu.

Postup čištění

Detergent se používá k provádění čisticí procedury WBC Hard Clean na hematologických analyzátoch Icon-5, Icon-5 OP a iVet-5. Provedení čištění se doporučuje, pokud analyzátor hlásí 3 po sobě jdoucí vzorky s příznaky WBC Nesprávné napětí a WBC Noise.

Chcete-li provést WBC Hard Clean, klepněte na »Management« v hlavní nabídce a poté přejděte do podnabídky „Cleaning“. Existují dvě různé možnosti čištění, ze kterých si můžete vybrat v závislosti na tom, která sada zkumavek reagensů se používá:

- Čištění pomocí staré sady hadiček – bez Quick Lock
- Čištění pomocí nové sady hadiček – s Quick Lock

Postupujte podle pokynů na analyzátoru. Software vás provede procesem čištění.

► Vysvětlení symbolů ◀

 REF	Katalogové číslo	 LOT	Číslo šarže
 	Datum expirace	 IVD	Diagnostický zdravotnický prostředek in vitro
	Povolená skladovací teplota	 CE	Značka CE
	Viz návod k použití		Výrobce
	Poleptání – způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.	 CONT	Obsah