

BioVendor – Laboratorní medicína a.s.
Sídlo: Tůmova 2265/60, 616 00 Brno
Provozovna: Karásek 1767/1, 621 00 Brno-Řečkovice

Bordetella Supplement

Návod k použití

Katalogové číslo: **LC6015**

Obsah soupravy: 10 ampulí lyofilizovaného suplementu

Skladování: při 2-8 °C

Exspirace: 3 roky ode dne výroby

Účel použití

Selektivní suplement pro izolaci rodu *Bordetella*.

Složení (obsah jedné ampule)

Cefalexin 20 mg

Příprava

Asepticky rekonstituujte 1 ampuli pomocí 5 ml sterilní destilované vody. Jemně promíchejte, dokud se vše nerozpustí a přidejte asepticky do 500 ml Bordet Gengou Agar (Kat.č. LC1107), který byl autoklávován, zchlazen na 50 °C a byla do něj již přidána 5-10% defibrinovaná sterilní krev. Dobře promíchejte a rozplňte do sterilních nádob.

Produkt

Bordetella supplement

Bordet-Gengou Agar Base

Kat.č.

LC6015

LC1107

Velikost balení

10 ampulí, každá pro 500 ml média

500 g

Kontrola kvality

Následující výsledky byly získány inokulací média kontrolními kmeny, s 5% ovčí krví, a následnou inkubací při 35 ± 2°C a odečtením po 48-72 hodinách.

Mikroorganismus

růst

Bordetella bronchiseptica ATCC 4617

dobrý

Bordetella pertussis ATCC 8467

dobrý

Bordetella parapertussis ATCC 15311

dobrý

Literatura

MacFaddin, J.F. 1985. Media for isolation-cultivation-identification-maintenance of medical bacteria, vol. 1. Williams & Wilkins, Baltimore, M.D.

Marcon, M.J. 1995. *Bordetella*, p. 566-573. In P.R. Murray, E.J. Baron, M.A. Pfaller, F.C. Tenover, and R.H. Tenover (ed.), Manual of clinical microbiology, 6th ed.

American Society for Microbiology, Washington, D.C.

Výrobce:

LABORATORIOS CONDA

C/ La Forja, 9 · 28850

Torrejón de Ardoz · Madrid

tel. +34 91 761 02 00

fax. +34 91 656 82 28

www.condalab.com

Zplnomocněný zástupce výrobce v ČR:

BioVendor – Laboratorní medicína a.s.

Tůmova 2265/60

616 00 Brno

tel.: 549 124 111

fax: 549 211 465

mail: info@biovendor.cz

www.biovendor.com