

BioVendor – Laboratorní medicína a.s.
Sídlo: Tůmova 2265/60, 616 00 Brno
Provozovna: Karásek 1767/1, 621 00 Brno -Řečkovice

Cefoxitin MRSA Supplement

Návod k použití

Katalogové číslo: **LC6069**

Obsah soupravy: 10 ampulí lyofilizovaného suplementu

Skladování: při 2-8 °C

Exspirace: 3 roky ode dne výroby

Účel použití

Pro detekci meticilin rezistentních *Staphylococcus aureus*.

Složení (obsah jedné ampule)

Cefoxitin 2 mg

Příprava

Asepticky rekonstituujte 1 ampuli s 5 ml sterilní destilované vody. Jemně míchejte, dokud se zcela nerozpustí. Asepticky přidejte do 500 ml MRSA AGAR (kat.č. LC1423), autoklávovaného a zchlazeného na 50 °C. Dobře promíchejte, rozplňte do sterilních nádob.

Produkt	Kat.č.	Velikost balení
Cefoxitin Supplement	LC6069	10 ampulí
MRSA Agar	LC1423	500 g

Kontrola kvality

Následující výsledky byly získány inokulací média kontrolními kmeny s přidáním suplementem po inkubaci při teplotě 37 ± 2°C a odečtením po 18-24 hodinách.

Mikroorganismus	růst	barva kolonií
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	inhibován	-
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 43300	dobry	modrá
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	inhibován	-

Literatura

Hutchison, M.J., Edwards, G.F.S., Morrison, D., „ Evaluation of chromogenic MRSA Reference Laboratory presented at the 2005 Institute of BioMedical

Výrobce:

LABORATORIOS CONDA

C/ La Forja, 9 · 28850

Torrejón de Ardoz · Madrid

tel. +34 91 761 02 00

fax. +34 91 656 82 28

www.condalab.com

Zplnomocněný zástupce výrobce v ČR:

BioVendor – Laboratorní medicína a.s.

Tůmova 2265/60

616 00 Brno

tel.: 549 124 111

fax: 549 211 465

mail: info@biovendor.cz