



CovAbScreen™
SARS-CoV-2 Ab Test


Test na stanovení protilátek proti COVID-19 ze vzorku slin

Stručný návod k použití

1 Nejezte a nepijte min. 10 minut před odběrem vzorku. Otevřete balení testu a zkontrolujte jednotlivé komponenty.


Každé balení CovAbScreen™ obsahuje:

- A. 1 ks kapátka
- B. 1 uzavřenou zkumavku s roztokem
- C. 1 ks zabalené odběrovou tyčinku
- D. 1 ks testovací kazety se sušidlem zabalené ve fólii

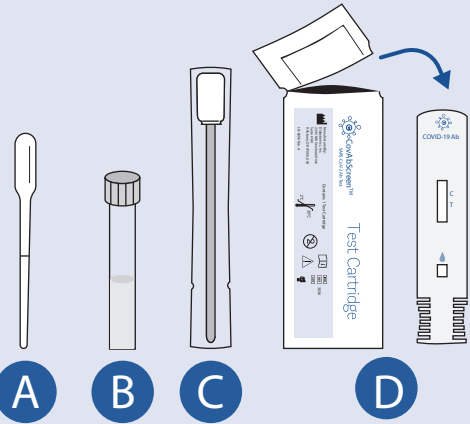


Požadován ale není součástí balení - časovač


2 Otevřete zkumavku a položte na rovný povrch.

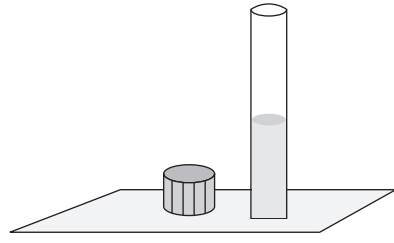

3 Vyjměte odběrovou tyčinku z obalu.

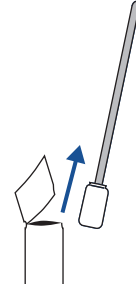


4 Vložte tyčinku do úst proti linii horních dásní. Pomalu setřete podél linie dásní zprava doleva a zpět. Otočte tyčinku a opakujte postup na linii dolní dásně. Postupujte jemně, dásně neodřete. Postupujte při odběru přesně podle návodu.

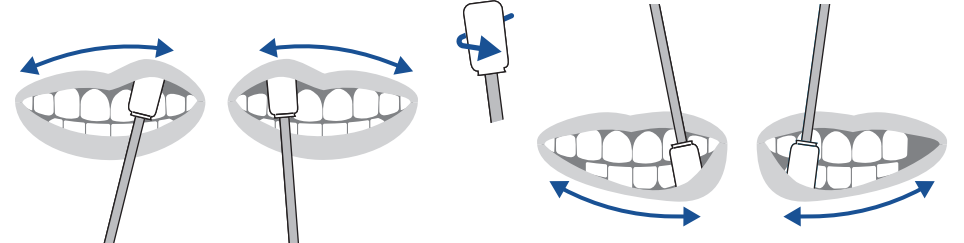


5 Opatrně vložte tyčinku do roztoku ve zkumavce (bez stříknutí) a jemně tlačte tyčinku nahoru a dolů roztokem 6-8 x, aby se sliny dostatečně promíchaly s roztokem.




6 Snažte se vymáchnout zbývající tekutinu z tyčinky tlakem o stěnu zkumavky. Tyčinku vyjměte a vyhodte.

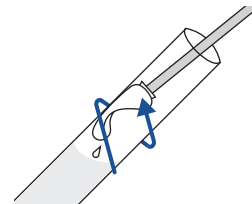


7 Vyjměte testovací kazetu z obalu a položte na rovný povrch. Vyhodte sušidlo.

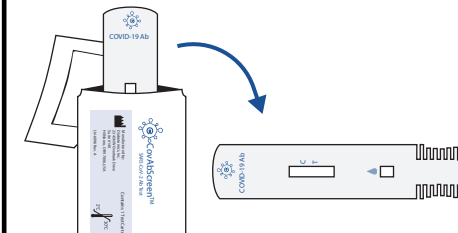


8 Pro přesun vzorku na testovací kazetu použijte kapátko. Vložte jej do zkumavky, zmáčkněte horní kulatou část a uvolněte. Roztok se nasaje do kapátka.

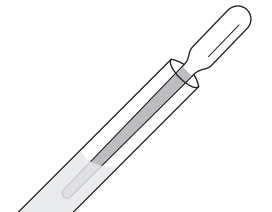


9 Přesuňte kapátko nad testovací kazetu a jemně stiskněte horní kulovitou část kapátka. Nakapte 5 kapek do čtvercového otvoru pro vzorek.

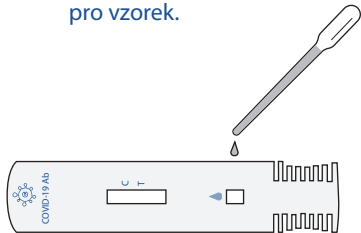


10 Zapněte časovač a po 15 minutách můžete odečíst výsledek.

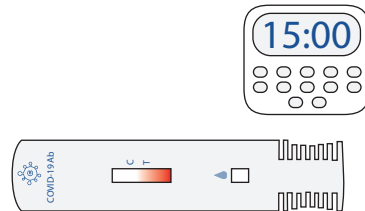

11 Po 15 minutách odečtěte výsledek na testovacím poli kazety. Neodečítejte po více než 20 minutách.

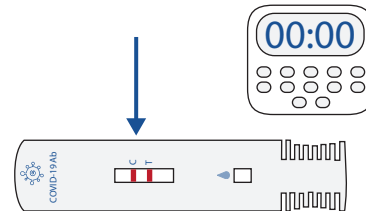

12 Interpretace výsledků

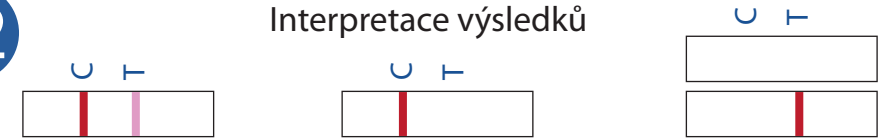

Pokud jsou zobrazeny 2 barevné linie C a T, je test pozitivní na protilátky proti COVID-19. I velmi slabá linie označena T znamená pozitivní výsledek.

Pokud je zobrazena 1 barevná linie C, je test negativní na protilátky proti COVID-19.

Pokud není zobrazena žádná barevná linie nebo pouze ta označená T, je test neplatný a nutné jej opakovat.

Po skončení testu lze veškerý materiál vyhodit do běžného odpadu.



Manufactured by:
Diabetomics, Inc.
2345 NE Overlook Drive
Suite #140
Hillsboro, OR 97006
LN-6105, Rev. B

Pro diagnostické použití in vitro. Více na www.biovendor.cz

Diabetomics, Inc. 2020 All rights reserved

BioVendor
LM®

BioVendor – Laboratorní medicína a.s.
Karásek 1767/1, 621 00 Brno, Česká republika
+420 549 124 111 | info@biovendor.cz | www.biovendor.cz